


SÅDAN BRUGES **CARDIAID CT0207RS**

1

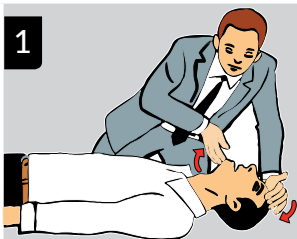

Læg patienten på ryggen. Åbn luftvejene ved at løfte hovedet tilbage og kæben op. Se, lyt og føl efter vejtrækning.

2




Er der unormal eller manglende vejtrækning, bed nogen om at ringe 112 og send én afsted efter hjertestarteren. Påbegynd hjerte-lunge-redning og fortsæt til hjertestarteren ankommer.

3



Ring selv 112 hvis du er alene.

4

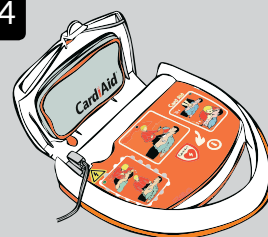


CardiAid tænder automatisk når låget åbnes. Følg de verbale og visuelle instrukser.

5




Fjern tøjet fra patientens bryst. Hvis det er nødvendigt, bruges saksen i nødhjælpstasken til at klippe tøjet op.

6

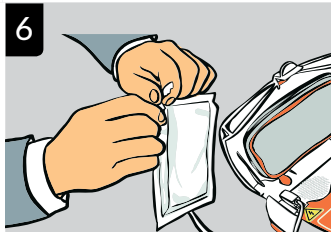

Åbn pakken med elektroderne.

7

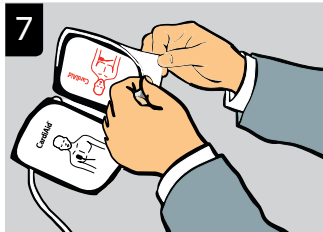


Tag filmen af den ene elektrode og placér elektroden på patientens bare bryst som vist på pakningen.

8




Tag filmen af den anden elektrode og placér elektroden på patientens bare bryst som vist på pakningen.

9

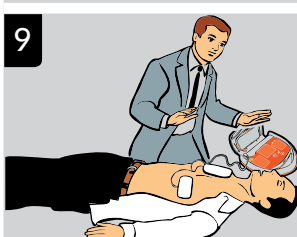

CardiAid begynder at analysere hjerterytmen med det samme. Rør ikke patienten fra nu af.

10

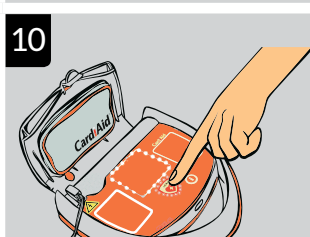

CardiAid fortæller dig, om det er nødvendigt at afgive stød eller ej. Hvis det er nødvendigt, forberedes stødet automatisk. Stødet gives ved at trykke på knappen.

11



CardiAid fortsætter med at guide dig gennem hjerte-lunge-redningen. Følg de verbale instrukser og giv først 30 brystkompressioner. CardiAid afgiver et metronomesignal, som du kan følge for at udføre hjertemassagen i rette tempo.

12



Giv 2 mund-til-mund indblæsninger efter de 30 brystkompressioner. Fortsæt med hjerte-lunge-redning indtil du hører "undgå at berøre patienten fra nu af".